

Benutzung der wiederverwendbaren Gesichtsmaske/Mund-Nasen-Maske:

1. Maske vor Gebrauch mit Waschmittel bei 60°C waschen.
2. Wichtig: Vor dem Aufsetzen Hände mit Seife waschen.
3. Beim Tragen die Maske nicht anfassen.
4. Ist die Maske feucht geworden, gleich auswechseln.
5. Vor dem Abnehmen Hände mit Seife waschen.
6. Beim Abnehmen möglichst nicht die Außenseite anfassen, Schlaufen nutzen und danach erneut die Hände waschen.
7. Maske nach dem Gebrauch mit Waschmittel bei 60°C waschen.
8. Die Maske trocken und luftig aufbewahren.

Merkmale / Hinweise:

- wiederverwendbare Gesichtsmaske/Mund-Nasen-Maske mit/ ohne formbaren Nasenbügel
- Fixierung mit elastischen Bündchen hinter den Ohren
- waschbar bis zu 60°C
- nicht chemisch reinigen
- nicht über Nasenbügel, Nähte und Gummi bügeln
- immer separat waschen Farben können ausbleichen/ausbluten und überschüssige Farbe abgeben*

*(dies stellt keinen Reklamationsgrund da)